

Produktinformation

Mund- und Nasenmasken

Klassifizierung: keine
Produktbezeichnung: Hilfsmittel Mund- und Nasenmaske
Hersteller: Junker-Filter GmbH



Verwendungszweck

Sehr leichte Formmaske, die als Hilfsmittel (Mund- und Nasenmaske) dient. Umgebungsschutz vor Tröpfchen durch das Ausatmen, Niesen oder Husten durch den Träger.

Artikel 07000047 Seite 3



Artikel 07000049 Seite 4



Achtung

Produkt schützt nicht vor Gesundheitsgefahren!



Keine Persönliche Schutzausrüstung (PSA) gemäß der Verordnung (EU) 2016/425. Dient **nicht** als Schutz gegen ein oder mehrere Risiken für die Gesundheit oder Sicherheit des Trägers.

Kein Medizinprodukt! **Keine** Gesichts- bzw. Atemschutzmaske!

Produktinformation

Artikel 07000047



Produktbeschreibung

Latexfreie, ergonomisch geformte Mund- und Nasenmaske aus einem mehrlagigen Polyestervlies. Die Außenseite der Mund- und Nasenmaske besteht aus einem Mikrofaservlies, welches im Meltblown-Verfahren hergestellt wird. Die Innenlage bildet ein robustes Polyestervlies. Beide Lagen sind fest durch ein thermisches Prägeverfahren verschweißt. Eine weiche Schaumstoff-Dichtlippe am Nasenrücken ermöglicht eine gute Abdichtung und hohen Tragekomfort. Für einen festen Sitz beim Tragen der Maske sorgt ein Gummiband. Gummiband kann an Kopfumfang angepasst werden.

Material

Maske:	<p>Polyestervlies mit Meltblownvlieslage</p> <p>Filterklasse: F7 (Norm: DIN EN 779:2012), für Feinstaubabscheidung geeignet</p> <p>Anfänglicher Druckverlust: ca. 55 Pa bei einer Anströmgeschwindigkeit von 0,16 m/s</p> <p>Entflammbarkeit: F1 nach DIN 53438</p> <p>Luftdurchlässigkeit: ca. 400 l/dm²/min @200Pa</p> <p>Flächengewicht: ca. 210 g/m²</p>
Band:	Rundgummi mit Metallsplint, blau/schwarz



Produktinformation

Artikel 07000049



Produktbeschreibung

Latexfreie, ergonomisch geformte Mund- und Nasenmaske aus einem mehrlagigen synthetischen Vlies. Die eine Seite der Mund- und Nasenmaske besteht aus einem Mikrofaservlies, welches im Meltblown-Verfahren hergestellt wird. Die zweite Lage bildet ein synthetisches Vlies. Für einen festen Sitz beim Tragen der Maske sorgen ein weißes Gummiband und ein **formbarer Nasenbügel**. Gummiband kann an Kopfumfang angepasst werden.

Material

Maske:	<p>synthetisches Vlies mit Meltblownvlieslage</p> <p>Filterklasse: M5 (Norm: DIN EN 779:2012), für Feinstaubabscheidung geeignet</p> <p>Anfänglicher Druckverlust: ca. 22 Pa bei einer Anströmgeschwindigkeit von 0,16 m/s</p> <p>Entflammbarkeit: F1 nach DIN 53438</p> <p>Luftdurchlässigkeit: ca. 700-1.000 l/dm²/min @200Pa</p> <p>Flächengewicht: ca. 100 g/m²</p>
Band:	Rundgummi mit Metallsplint, weiß




Produktinformation

Anwendung

Das Tragen einer Mund- und Nasenmaske schützt die umgebenden Personen und die Umgebung vor Speichel- /Schleimtröpfchen beim Ausatmen, Niesen oder Husten durch den Träger der Mund- und Nasenmaske.

Die Mund- und Nasenmaske ist z.B. für nichtmedizinisches Pflegepersonal, Firmen, Behörden und weitere Institutionen gedacht.

Nicht für medizinische Bereiche geeignet. Keine PSA. Kein Medizinprodukt.

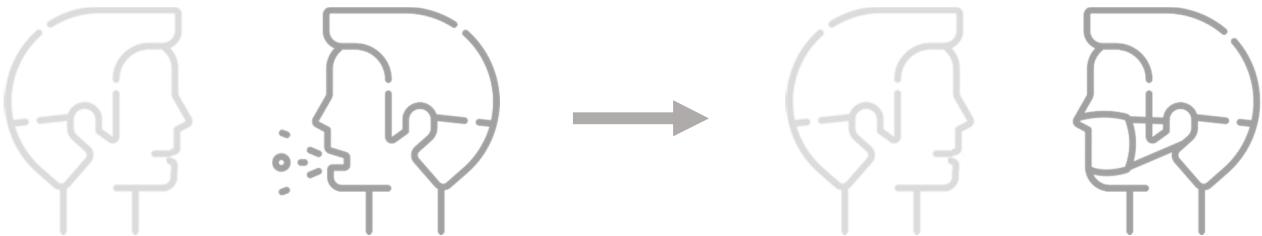

Trageempfehlung

Sofortiger Wechsel der Mund- und Nasenmaske bei (vermuteter) Kontamination bzw. Durchfeuchtung. Verwendung der Mund- und Nasenmaske nur durch dieselbe Person für **maximal 2 Stunden empfohlen**. **Das Robert-Koch-Institut hat aufgrund der aktuellen Situation (Stand 03/2020) die Empfehlung auf 8 Stunden bis zum 31.08.2020 ausgeweitet.**

Das Absetzen und die Lagerung der Mund- und Nasenmaske müssen so erfolgen, dass eine Kontamination der Mund- und Nasenmaske (vor allem der Innenseite) bzw. eine Kontamination des Gesichtes verhindert wird.

Die gebrauchte Mund- und Nasenmaske ist eindeutig einer Person zuzuordnen. Ein Tragen durch andere Personen ist auszuschließen.

Mund- und Nasenmasken, deren Innenfläche möglicherweise mit Erregern kontaminiert wurde, sind aus präventiver Sicht sofort fachgerecht zu entsorgen. Ein Reinigen oder Desinfizieren kann die Funktionstüchtigkeit negativ beeinflussen.

Eine Händedesinfektion ist vor dem An- und Ablegen der Mund- und Nasenmaske wichtig!



Junker-Filter GmbH
Carl-Benz-Str. 11
74889 Sinsheim

Tel.: +49 (0)7261 9283-0
E-Mail: info@junkerfilter.de
Web: www.junkerfilter.de

Tatjana Wagner +49 162 2988053
Julian Nuss +49 162 2988057

Produktinformation

Warnhinweise

Beachten Sie unbedingt die nachfolgenden Hinweise, da ihre Nichtbeachtung zu Übelkeit oder gar zum Tod führen kann!

1. Mund- und Nasenmasken nur in ausreichend belüfteten Umgebungen und mit ausreichender Sauerstoffkonzentration einsetzen.
2. Raum sofort verlassen und Mund- und Nasenmasken absetzen, wenn das Atmen schwierig wird und/oder Schwindel oder Erschöpfung auftritt.
3. Nicht steril! Kein Medizinprodukt!
4. Mund- und Nasenmasken sind kein Atemschutz im Sinne der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 und schützen nicht vor dem Einatmen von Aerosolen.

Lagerung

Ohne direkte Sonneneinstrahlung, in Originalverpackung trocken lagern.

Entsorgung

Das Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden.

Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten.